

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Κωδικός: Ο.510.01

Αρ. Έκδοσης: 1

Ημ/νία: 01-12-2016

Σελ 1 από 10

A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Ορμονολογικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου μας **λειτουργεί** μόνον εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η **επικοινωνία** με το εργαστήριο μπορεί να γίνει:

- τηλεφωνικά: 213 200 9560 και 213 200 9563
- με FAX: 213 200 9562
- στο mail: ormonologiko@aglaiakyriakou.gr

Στο Εργαστήριο **εκτελούνται** οι εξής προσδιορισμοί:

- T3
- T4
- FT4
- FT3
- TSH
- Θυρεοσφαιρίνη (Tg)
- Αντιθυρεοειδικά αντισώματα έναντι της υπεροξειδάσης (Anti-TPO)
- Αντιθυρεοειδικά αντισώματα έναντι της θυρεοσφαιρίνης (Anti-Tg)
- FSH
- LH
- Προλακτίνη
- Οιστραδιόλη (E2)
- Προγεστερόνη
- Τεστοστερόνη
- DHEA-S
- 17αΟΗ Προγεστερόνη
- Ινσουλίνη
- Κορτιζόλη
- Αυξητική ορμόνη
- IGF-1 και
- β-χοριακή γοναδοτροπίνη (β-HCG).

Το σύνολο του προσωπικού είναι άριστα εκπαιδευμένο με υψηλό αίσθημα ευθύνης και ακολουθεί όλους τους κανόνες ηθικής, δεοντολογίας και εχεμύθειας. Στα πλαίσια αυτά λαμβάνεται μέριμνα για την ασφάλεια των δεδομένων που τηρούνται στο

Σύνταξη:

Έγκριση:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Κωδικός: Ο.510.01

Αρ. Έκδοσης: 1

Ημ/νία: 01-12-2016

Σελ 2 από 10

εργαστήριο (είτε αυτά τηρούνται σε έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική μορφή) ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των ασθενών.

Πληροφορίες που αφορούν στη λήψη και μεταφορά των δειγμάτων καθώς και πληροφορίες που αφορούν στη συμπλήρωση των σχετικών παραπεμπτικών αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους της παρούσας οδηγίας.

Το ιατρικό προσωπικό του εργαστηρίου παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες όσον αφορά την επιλογή εξετάσεων στα πλαίσια διερεύνησης συγκεκριμένων περιστατικών.

Καθώς στόχος του εργαστηρίου είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας προς τους αποδέκτες των υπηρεσιών του, θεωρείται σημαντική η ενημέρωσή μας για οποιοδήποτε σχόλιο, παράπονο, παρατήρηση σχετικά με τις παρεχόμενες, από το εργαστήριο, υπηρεσίες.

B. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

- Η αιμοληψία **ΔΕΝ** πρέπει να γίνεται από χέρι που λαμβάνει ορό
- Η περίδεση να είναι χαλαρή και να μην παραμένει για αρκετή ώρα

Όλοι οι προσδιορισμοί του Ορμονολογικού Εργαστηρίου εκτελούνται **σε ορό**, δηλαδή το αίμα συλλέγεται σε σωληνάρια χωρίς αντιπηκτικό (πήγμα).

Εναλλακτικά και μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις κάποιες εκ των ορμονών μπορεί να προσδιοριστούν και σε πλάσμα. Όμως επειδή ανά ορμόνη οι οδηγίες ως προς τη φύση του αντιπηκτικού διαφέρουν και -το σημαντικότερο- μπορεί να διαφοροποιούνται τα αποτελέσματα (άρα και οι τιμές αναφοράς), όταν αποστέλλεται πλάσμα, επιβάλλεται ενημέρωση και συνεννόηση με το Εργαστήριο εάν είναι εφικτός ο προσδιορισμός.

Γ. ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΩΝ

Η πλήρης **συμπλήρωση των παραπεμπτικών** (έντυπων ή χειρόγραφων) είναι παραπάνω από σημαντική στον προσδιορισμό των ορμονών, καθότι οι τιμές αναφοράς διαφοροποιούνται δραματικά αναλόγως του φύλου και της ηλικίας -και όχι μόνον.

Πρέπει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του ασθενούς να είναι ευανάγνωστα και ορθογραφημένα και επιπλέον να αναγράφονται:

- η ημερομηνία γέννησης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Κωδικός: Ο.510.01

Αρ. Έκδοσης: 1

Ημ/νία: 01-12-2016

Σελ 3 από 10

- το φύλο
- ο αριθμός μητρώου του Νοσοκομείου
- το σημείο όπου θα αποσταλούν τα αποτελέσματα (ΕΙ, Κλινική, Τμήμα)
- σφραγίδα του παραγγέλλοντος ιατρού και
- ό,τι επιπλέον στοιχεία κρίνονται απαραίτητα για την αξιολόγηση του αποτελέσματος.

Ο αιμολήπτης πρέπει να ελέγχει τα αναγραφόμενα στοιχεία του παραπεμπτικού και:

- να διορθώνει τυχόν λάθη (π.χ. στο ονοματεπώνυμο)
- να συμπληρώνει ελλιπή στοιχεία (π.χ. ημερομηνία γέννησης)
- να αναγράφει την ημερομηνία και ώρα της αιμοληψίας
- να αναγράφει απαραίτητες πληροφορίες όπως ορίζονται στους πίνακες οδηγιών αναλόγως των ζητούμενων εξετάσεων (π.χ. νηστεία ή όχι, ΤΕΡ κλπ)
- να αναγράφει τον κωδικό του

Η σήμανση του σωληναρίου με το ονοματεπώνυμο του ασθενούς, την προέλευση του δείγματος (ΕΙ, Κλινική, Τμήμα) και την ημερομηνία λήψης είναι σοβαρή και πρέπει να γίνεται άμεσα πριν τη λήψη του δείγματος παρόντος του ασθενούς και επαναβεβαιώνοντας την ταυτότητά του με προφορική ερώτηση (στον γονέα, εφ' όσον πρόκειται για παιδιά).

Παραπεμπτικά δειγμάτων που θεωρούνται επείγοντα θα πρέπει να αναγράφουν ευκρινώς τη λέξη «**ΕΠΕΙΓΟΝ**» ώστε να δοθεί αντίστοιχη προτεραιότητα από το προσωπικό του Εργαστηρίου.

Μολυσματικά δείγματα θα πρέπει να επισημαίνονται βάσει των οδηγιών της Επιτροπής Λοιμώξεων του Νοσοκομείου.

Δ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Τα αίματα μεταφέρονται στο Εργαστήριο **το συντομότερο δυνατόν** (maximum **μία ώρα** μέχρι την φυγοκέντρηση), μέσα στα ειδικά πλαστικά σακουλάκια μεταφοράς με τις **δύο θήκες**. Στη **θήκη που κλείνει** τοποθετούνται τα **δείγματα** και στην άλλη τα παραπεμπτικά, για να μη μολύνονται. **Η θήκη με τα δείγματα πρέπει να κλείνεται**, ώστε σε περίπτωση ατυχήματος να μη διασπαρεί το βιολογικό υλικό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Κωδικός: Ο.510.01

Αρ. Έκδοσης: 1

Ημ/νία: 01-12-2016

Σελ 4 από 10

Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Ακατάλληλα θεωρούνται τα δείγματα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Δείγματα χωρίς ονοματεπώνυμο ασθενούς
- Δείγματα χωρίς παραπεμπτικό
- Μη αντιστοίχιση στοιχείων δείγματος και παραπεμπτικού
- Δείγματα σε λάθος φιαλίδιο

ΣΤ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι οροί των ασθενών **μετά το πέρας των αναλύσεων**, συντηρούνται ασφαλώς (-20°C) στο Εργαστήριο για ένα μήνα από την ημέρα της αιμοληψίας. Κατά το διάστημα αυτό είναι δυνατή η παραγγελία συμπληρωματικών εξετάσεων, εάν ο θεράπων ιατρός κρίνει.

Ακολουθεί πίνακας με λεπτομερείς οδηγίες για κάθε εξέταση.

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ- ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Κωδικός: Ο.510.01

Αρ. Έκδοσης: 1

Ημ/νία: 01-12-2016

Σελ 5 από 10

Ζ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Εξέταση	Είδος δείγματος	Σωληνάριο	Απαιτούμενη ποσότητα ολικού αίματος	Σταθερότητα φυγοκεντρημένου και αποχωρισμένου δείγματος	Συνώνυμα/ Συντομογραφίες	Χρόνος απάντησης	Παρατηρήσεις
TSH	ορός	Χωρίς αντιπηκτικό (κόκκινο πώμα)	1ml	2-8°C: 7 ημέρες -20°C: ένας μήνας	Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη ή θυρεοτροπίνη	αυθημερόν	Πρωινό δείγμα
T₄	ορός	Χωρίς αντιπηκτικό (κόκκινο πώμα)	1ml	2-8°C: 7 ημέρες -20°C: ένας μήνας	Θυροξίνη ή τετραϊωδοθυρονίνη	3 εργάσιμες ημέρες	
T₃	ορός	Χωρίς αντιπηκτικό (κόκκινο πώμα)	1ml	2-8°C: 7 ημέρες -20°C: ένας μήνας	Τριιωδοθυρονίνη	3 εργάσιμες ημέρες	
FT₄	ορός	Χωρίς αντιπηκτικό (κόκκινο πώμα)	1ml	2-8°C: 7 ημέρες -20°C: ένας μήνας	Ελεύθερη T4 (free T4)	3 εργάσιμες ημέρες	
FT₃	ορός	Χωρίς αντιπηκτικό (κόκκινο πώμα)	1ml	2-8°C: 7 ημέρες -20°C: ένας μήνας	Ελεύθερη T3 (free T3)	3 εργάσιμες ημέρες	

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ- ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Κωδικός: O.510.01

Αρ. Έκδοσης: 1

Ημ/νία: 01-12-2016

Σελ 6 από 10

Ζ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Εξέταση	Είδος δειγματος	Σωληνάριο	Απαιτούμενη ποσότητα ολικού αίματος	Σταθερότητα φυγοκεντρημένου και αποχωρισμένου δείγματος	Συνώνυμα/ Συντομογραφίες	Χρόνος απάντησης	Παρατηρήσεις
Θυρεοσφαιρίνη	ορός	Χωρίς αντιπηκτικό (κόκκινο πώμα)	1ml	Θ. δωματίου: 48ώρες 2-8°C: 3ημέρες -20°C: ένας μήνας	TG	3 εργάσιμες ημέρες	
Αντι-TPO Abs	ορός	Χωρίς αντιπηκτικό (κόκκινο πώμα)	1ml	2-8°C: 7ημέρες -20°C: ένας μήνας	Αντιθυρεοειδικά αντισώματα έναντι της θυρεοειδικής υπεροξειδάσης (παλιότερα αντιμικροσωμιακά)	7 εργάσιμες ημέρες (έως ένα δεκαήμερο)	
Αντι-TG Abs	ορός	Χωρίς αντιπηκτικό (κόκκινο πώμα)	1ml	2-8°C: 7 ημέρες -20°C: ένας μήνας	Αντιθυρεοειδικά αντισώματα έναντι της θυρεοσφαιρίνης, ή αντιθυρεοσφαιρινικά αντισώματα	7 εργάσιμες ημέρες (έως ένα δεκαήμερο)	
Πλήρης θυρεοειδικός έλεγχος	ορός	Χωρίς αντιπηκτικό (κόκκινο πώμα)	2,5ml			7 εργάσιμες ημέρες (έως ένα δεκαήμερο)	

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ- ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Κωδικός: Ο.510.01

Αρ. Έκδοσης: 1

Ημ/νία: 01-12-2016

Σελ 7 από 10

Ζ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Εξέταση	Είδος δειγματος	Σωληνάριο	Απαιτούμενη ποσότητα ολικού αίματος	Σταθερότητα φυγοκεντρημένου και αποχωρισμένου δείγματος	Συνώνυμα/ Συντομογραφίες	Χρόνος απάντησης	Παρατηρήσεις
FSH	ορός	Χωρίς αντιπηκτικό (κόκκινο πώμα)	1ml	2-8°C: 14 ημέρες -20°C: 6 μήνες	Θυλακιοτρόπος ορμόνη	3 εργάσιμες ημέρες	Εάν είναι κορίτσι στην εφηβεία ή ενήλικη γυναίκα να αναγράφεται η ημερομηνία τελευταίας έμμηνης ρύσης στο παραπτεμπτικό
LH	ορός	Χωρίς αντιπηκτικό (κόκκινο πώμα)	1ml	2-8°C: 14 ημέρες -20°C: 6 μήνες	Ωχρινοτρόπος ορμόνη	3 εργάσιμες ημέρες	Εάν είναι κορίτσι στην εφηβεία ή γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας να αναγράφεται η ημερομηνία τελευταίας έμμηνης ρύσης στο παραπτεμπτικό
Προλακτίνη	ορός	Χωρίς αντιπηκτικό (κόκκινο πώμα)	1ml	2-8°C: 14 ημέρες -20°C: 6 μήνες	PRL	3 εργάσιμες ημέρες	Καλύτερη ώρα λήψης 11:00 πμ και στις γυναίκες 2η-5η ημέρα του κύκλου. Εάν είναι κορίτσι στην εφηβεία ή γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας να αναγράφεται η ημερομηνία τελευταίας έμμηνης ρύσης στο παραπτεμπτικό
Οιστραδιόλη	ορός	Χωρίς αντιπηκτικό (κόκκινο πώμα)	1ml	2-8°C: 2 ημέρες -20°C: 6 μήνες	E2	3 εργάσιμες ημέρες	Εάν είναι κορίτσι στην εφηβεία ή γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας να αναγράφεται η ημερομηνία τελευταίας έμμηνης ρύσης στο παραπτεμπτικό

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ- ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Κωδικός: Ο.510.01

Αρ. Έκδοσης: 1

Ημ/νία: 01-12-2016

Σελ 8 από 10

Ζ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Εξέταση	Είδος δειγματος	Σωληνάριο	Απαιτούμενη ποσότητα ολικού αίματος	Σταθερότητα φυγοκεντρημένου και αποχωρισμένου δείγματος	Συνώνυμα/ Συντομογραφίες	Χρόνος απάντησης	Παρατηρήσεις
Προγεστερόνη	ορός	Χωρίς αντιπηκτικό (κόκκινο πώμα)	1ml	2-8°C: 5 ημέρες -20°C: 6 μήνες		3 εργάσιμες ημέρες	Εάν είναι κορίτσι στην εφηβεία ή γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας να αναγράφεται η ημερομηνία τελευταίας έμμηνης ρύσης στο παραπεμπτικό
Τεστοστερόνη	ορός	Χωρίς αντιπηκτικό (κόκκινο πώμα)	1ml	2-8°C: 7 ημέρες -20°C: 6 μήνες	Te	3 εργάσιμες ημέρες	
DHEA-S	ορός	Χωρίς αντιπηκτικό (κόκκινο πώμα)	1ml	2-8°C: 2 ημέρες -20°C: 2 μήνες	Θειική δεϋδροεπιανδροστερόνη	3 εργάσιμες ημέρες	
17OH-Προγεστερόνη	ορός	Χωρίς αντιπηκτικό (κόκκινο πώμα)	1ml	2-8°C: 7ημέρες -20°C: ένας μήνας	17 υδροξυ-προγεστερόνη	15 εργάσιμες (έως 3 εβδομάδες)	Εάν είναι κορίτσι στην εφηβεία ή ενήλικη γυναίκα να αναγράφεται η ημερομηνία τελευταίας έμμηνης ρύσης στο παραπεμπτικό
Πλήρης έλεγχος γονάδων	ορός	Χωρίς αντιπηκτικό (κόκκινο πώμα)	3,0ml			15 εργάσιμες (έως 3 εβδομάδες)	

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ- ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Κωδικός: Ο.510.01

Αρ. Έκδοσης: 1

Ημ/νία: 01-12-2016

Σελ 9 από 10

Ζ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Εξέταση	Είδος δειγματος	Σωληνάριο	Απαιτούμενη ποσότητα ολικού αίματος	Σταθερότητα φυγοκεντρημένου και αποχωρισμένου δείγματος	Συνώνυμα/ Συντομογραφίες	Χρόνος απάντησης	Παρατηρήσεις
Ινσουλίνη	ορός	Χωρίς αντιπηκτικό (κόκκινο πώμα)	1ml	2-8°C: 24 ώρες -20°C: 6 μήνες		3 εργάσιμες ημέρες	Πρωινό δείγμα μετά 10ωρη νηστεία, εκτός και αν ορίζεται αλλιώς από τον ιατρό. Αποφυγή χειρισμών κατά την αιμοληψία, διότι αιμολυμένα δείγματα είναι ακατάλληλα
Κορτιζόλη	ορός	Χωρίς αντιπηκτικό (κόκκινο πώμα)	1ml	2-8°C: 5 ημέρες -20°C: 3 μήνες		αυθημερόν	Σημειώνεται πάντα η ώρα αιμοληψίας. Σωστές ώρες λήψης: 8:00 πρωί και 20:00 βράδυ.
Αυξητική ορμόνη	ορός	Χωρίς αντιπηκτικό (κόκκινο πώμα)	1ml	2-8°C: 7ημέρες -20°C: ένας μήνας	hGH	15 εργάσιμες ημέρες (έως 3 εβδομάδες)	
IGF-1	ορός	Χωρίς αντιπηκτικό (κόκκινο πώμα)	1ml	2-8°C: 7ημέρες -20°C: ένας μήνας	Σωματομεδίνη-C ή Ινσουλινόμορφος παράγων 1	20 εργάσιμες ημέρες (έως 4 εβδομάδες)	
β-HCG	ορός	Χωρίς αντιπηκτικό (κόκκινο πώμα)	1ml	2-8°C: 3 ημέρες -20°C: ένας χρόνος	βήτα χοριακή γοναδοτροπίνη	αυθημερόν	Η πιθανή εγκυμοσύνη επισημαίνεται και αναγράφεται η ημερομηνία τελευταίας έμμηνης ρύσης στο παραπεμπτικό

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ- ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Κωδικός: Ο.510.01

Αρ. Έκδοσης: 1

Ημ/νία: 01-12-2016

Σελ 10 από 10

Ζ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Εξέταση	Είδος δείγματος	Σωληνάριο	Απαιτούμενη ποσότητα ολικού αίματος	Σταθερότητα φυγοκεντρημένου και αποχωρισμένου δείγματος	Συνώνυμα/ Συντομογραφίες	Χρόνος απάντησης	Παρατηρήσεις
Ολόκληρος έλεγχος	ορός	Χωρίς αντιπηκτικό (κόκκινο πώμα)	4,0ml			20 εργάσιμες ημέρες (έως 4 εβδομάδες)	

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Έκδοση / Ημερομηνία	Περιγραφή τροποποίησης
1/01-12-2016	Αρχική Έκδοση